

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード：34864000


ネクスケア™ 救急絆創膏 (Waterproof)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止[一度開封してそのままにしておいた本品を使用したり、一度開封したものを再滅菌して使用したり、一度使用したものを再使用することをしないでください。製品の品質が保たれません。]
2. 本品の包装材料として一部天然ゴムを使用しています。天然ゴムに対して過敏症を起こす恐れのある方は使用しないでください。[アレルギー症状をまれに起こすことがあります。]

*【形状・構造及び原理等】

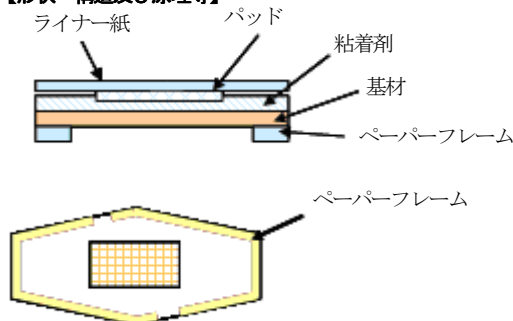

本品は、切り傷、すり傷等の創傷面を保護するために用いるパッド付きの滅菌済みの粘着テープです。ポリウレタンからなる基材にアクリル系粘着剤が塗布されており、ポリエステル、ポリエチレンからなるパッドが貼り付けられています。本品に1枚の台紙（ライナー紙）と2枚のペーパーフレームが貼られ、滅菌包装されています。包装材料の一部天然ゴムを使用しています。

対象となる傷：切り傷、すり傷、やけどなどに

人体に接触する部分の組成：アクリル系粘着剤（粘着剤部）
ポリエステル、ポリエチレン（パッド部）

【使用目的、効能又は効果】

傷の被覆および保護に用いる。

【品目仕様等】

無菌性保証水準（SAL） 10⁻⁶

【操作方法又は使用方法等】

《使用方法に関連する使用上の注意》

- ・貼付前に傷およびその周囲の皮膚を洗浄・消毒を行い清潔にし、水気をよく拭き取ってから貼付してください。
- ・粘着力が低下し、はがれる可能性があるため軟膏やクリームなどを塗布した皮膚に本品を貼らないでください。必要な場合は医師にご相談ください。
- ・滲出液の多い傷には本品を貼らないでください。
- ・適切なサイズを選択してください。
- ・引っ張ってのびた状態で貼付すると皮膚障害（発赤、発疹、痒み、水疱、表皮の剥離など）や剥がれの原因となるためご注意ください。

- ・貼付前に適用部位の止血を行ってください。
- ・適用部位は感染症やその他の合併症の兆候があるかどうかを確認するためによく観察してください。感染の兆候（発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）が認められる場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。
- ・水や滲出液でぬれた状態が続くと浸軟（ふやけ）を起こす場合があります。浸軟した状態で本品をはがすと表皮剥離を起こす場合があります。使用中に汚れたり、ぬれたりした場合は速やかに新しいものに貼り替えてください。
- ・本品は滅菌済ですので開封後は速やかに使用してください。一度使用した本品を再使用しないでください。

1. 使用方法

- 1) 滅菌済の本品を取り出してください。
- 2) 滅菌袋を開封します。
- 3) ライナー紙をはがします。
- *4) 傷口に粘着部分がふれないように、またパッドのまわりが浮かないようにしっかり押さえ、本品を貼ってください。
- 5) ペーパーフレームをはがします。

2. 除去（剥離）方法

- *はがすときは、皮膚への負担を軽減するために、皮膚が持ち上がらないように押さえ、毛の流れに沿って折り返しながらゆっくりとはがしてください。

【使用上の注意】

*1. 重要な基本的注意

- 1) 医師に相談の際はこの添付文書を持参してください。
- 2) 粘着製品により皮膚の異常を起こしやすい方は、使用前に医師に相談してください。
- 3) 本品はアレルギーテスト実施済みですが、全ての方にアレルギー反応が起こらないというわけではありません。
- 4) 傷の消毒は必要最小限に控えてください。不必要な消毒は傷の治癒の遅延につながる場合があります。
- 5) 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 6) 傷の治癒や改善が見られない場合または悪化する場合には医師または薬剤師に相談してください。

2. その他の注意

- 1) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されますが、使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないでください。
- 2) 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 3) 本品を再滅菌しないでください。
- 4) 本品使用後は、各自治体の定めた方法で廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の底面に記載（西暦年月表示）
例示：2013 05（西暦 2013 年 5 月）

***【包装】**

ネクスケア[™] 救急絆創膏

	カタログ番号	サイズ	枚数
Waterproof	WPD24S	S	24
	WPD20M	M	20
	WPD8L	L	8
	WPD16AS	S	8
		M	6
		L	2

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者

名称：スリーエム ヘルスケア株式会社

*住所：〒158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

発売元：住友スリーエム株式会社 コンシューマー製品事業部

〒158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

お問い合わせ先 TEL：03-3709-8938

外国製造所の国名及び製造業者名

米国、3M社 (3M Company) 又はテキサス アソ社 (Texas ASO)

ネクスケア[™] は、3M社の商標です。