

ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカル パッド

医療用品 4 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド
JMDN コード：71025000 販売名：ネクスケア™ ハイドロコロイド パッド

再使用禁止



【禁忌・禁止】

- 再使用禁止 [一度開封してそのままにしておいた本品を使用したり、一度使用したものを再使用しないでください。製品の品質が保たれません。]
- 次のような傷には使用しないこと。[傷が悪化したリ、治癒が遅れる場合がある]
 - 感染が見られる傷（赤くなっていたり、膿をもっていたり、熱や腫れ等の異常が認められる傷のこと）
 - 深いさし傷、筋肉・骨・腱が見えるような深い傷
 - 動物等に咬まれた傷
 - ガラス・木片・砂・ほこり・衣服の繊維など異物が入り込んだ傷
 - かさぶたがすでにできている傷
 - にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎
 - 目の周囲や粘膜の傷
- 滅菌包装材料に一部天然ゴムを使用しています。天然ゴムに対して過敏症を起こすおそれのある方はご使用にならないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は、軽度の創傷や熱傷を保護するために用いる、粘着テープ付きの滅菌済み創傷パッドです。アクリル系粘着剤を塗布処理したポリウレタン粘着フィルム（カバーフィルム）ダイヤモンド形状のハイドロコロイドパッドがついています。本品は表面のキャリアフィルムと裏面のライナーでラミネートされ、滅菌包装されています。

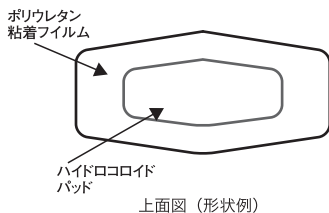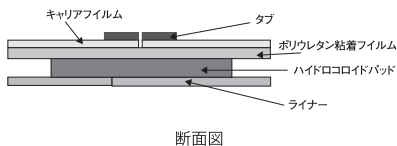


人体に接触する部分の組成

- アクリル系粘着剤（ポリウレタン粘着フィルム）
- ハイドロコロイド材（ハイドロコロイドパッド）

2. 原理

ハイドロコロイドパッドが創傷面を被覆して保護します。ハイドロコロイドパッドは創傷からの滲出液を吸収し、治癒に適した湿潤環境を整えます。また、防水透湿性のポリウレタン粘着フィルムが本品を創傷部に固定し、外部の汚染から守ります。

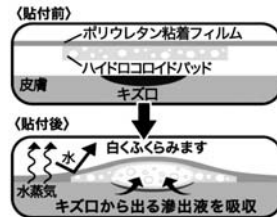

注：本品のパッド部分は、半透明なハイドロコロイド材でできています。ハイドロコロイドは、水分を吸収すると色が白く変わってふくらみますが製品の異常ではありません。また、本品を貼付した部分が発汗した場合、水分を吸収してハイドロコロイドパッド材が白くなることがあります。

【使用目的、効能又は効果】

軽度の切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷や軽度の熱傷を保護し、湿潤環境を維持することにより痛みの軽減や治癒の促進を図る。

【品目仕様等】

無菌性保証水準（SAL）：10⁻⁶

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法に関連する使用上の注意

- 貼付前に傷およびその周囲の皮膚を水道水等で洗浄を行い清潔にし、水気をよく拭き取ってから貼ってください。
- 粘着力が低下し、はがれる可能性があるため軟膏やクリームなどを塗布した皮膚に本品を貼らないでください。必要な場合は医師にご相談ください。
- 不必要な消毒は傷の治りを遅くすることがあります。殺菌・消毒剤を使用しないでください。使用した場合は、水道水などで洗浄し、水気をよく拭き取ってから貼ってください。
- 滲出液の多い傷には本品を貼らないでください。
- 貼付前に適用部位の止血を行ってください。
- 傷のサイズより大きいサイズを選択してください。
- 引っ張ってのびた状態で貼付すると皮膚障害（発赤、発疹、痒み、水疱、表皮の剥離など）やはがれの原因となるためご注意ください。
- 適用部位は感染症やその他の合併症の兆候があるかどうかを確認するためによく観察してください。感染症の兆候（発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）が認められる場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。
- ハイドロコロイドが水や滲出液を吸収しきれない状態が続くと、浸軟（ふやけ）を起こす場合があります。浸軟した状態で本品をはがすと表皮剥離を起こす場合があります。ハイドロコロイドパッドの端まで白くなった場合はすみやかに新しいものに貼り替えてください。

本品は通常の救急絆創膏とは異なりますのでご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

2. 使用方法

使用に際しては、添付文書を良く読んで使用方法・操作方法を確認し正しくご使用ください。

【貼付前】

- 1) 本品を貼付しようとする傷が、感染（発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）していないこと、かさぶたができていないことを確認してください。
- 2) 傷およびその周囲の皮膚を水道水等で洗浄を行い清潔にし、水気をよく拭き取ってから貼ってください。

【貼付時】

- 1) 滅菌包装のタブをつかんでゆっくりと開封してください。




- 2) 裏面の紙ライナー（①の表示）をはがして、傷の中心にハイドロコロイドパッドがかかるように軽くおさえて貼ります。（傷口に粘着部分が触れないように貼ってください）




- 3) 次に表面のキャリアフィルム（②の表示）をセンターから矢印の方向にはがし、上から軽く押さえます。



- 4) 次に裏面の紙ライナー（③の表示）を、タブをつかみゆっくりとはがしてください。

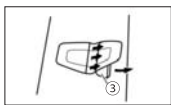

- 5) 最後に、表面のキャリアフィルム（④の表示）を矢印の方向にはがして軽く手で押さえてなじませてください。

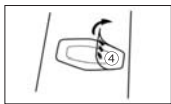

【貼付中】

- 1) 毎日傷の状態を観察してください。感染の兆候（発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）が認められる場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。
- 2) 滲出液がハイドロコロイドパッドからはみ出したり、ポリウレタン粘着フィルムがはがれたり、汚れたら【はがし方】に従い剥がし、新しい本品に貼り替えてください。

【はがし方】

- 1) はがすときは、まわりの皮膚及び傷口への負担を軽くするために、皮膚が持ち上がらないように押さえ、毛の流れに沿ってゆっくりとフィルムを伸ばしながらはがしてください。



【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用にあたり、本添付文書をよく読みご使用ください。
- 2) 糖尿病や血行障害の治療を受けている人は、使用につき医師に相談してください。医師に相談の際はこの添付文書を持参してください。
- 3) 粘着製品により皮膚の異常を起こしやすい方は、使用前に医師に相談してください。
- 4) 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 5) 傷の治癒や改善が見られない場合または悪化した場合には、医師または薬剤師に相談してください。
- 6) 本品を切って使用しないでください。
- 7) パッドサイズより大きな傷には使用しないでください。傷より大きいパッドサイズをご使用ください。
- 8) 滲出液が漏れたり、パッド部分が汚れたりはがれたりした場合はそのまま貼り続けしないでください。その場合は本品をはがし、傷を水道水などでよく洗浄した後、新しいものに貼り替え、傷口を清潔に保ってください。
- 9) 乳幼児には使用しないでください。また、小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用してください。
- 10) 乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。

2. その他の注意

- 1) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されますが、包装が破損または汚損が認められたときは使用しないでください。
- 2) 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 3) 本品を口に入れないでください。
- 4) 本品使用後は、各自自治体の定めた方法で廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。

2. 有効期間・使用の期限

外箱の底面に記載（西暦年月表示）

例示：2014 05 D23（西暦 2014 年 5 月）

【包装】

サイズ及び入り枚数は外箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

名称：スリーエムヘルスケア株式会社

住所：〒158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

製造業者

名称：新タック化成株式会社

住所：〒799-0197 愛媛県四国中央市川之江町長須 222-2

発売元

名称：住友スリーエム株式会社 コンシューマー製品事業部

住所：〒158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

お問い合わせ先 TEL：03-3709-8938