

## Transcend™ Series 6000 Ceramic Brackets

### トランセンド™ セラミック ブラケット

メタルスロットがないオールセラミックのため、着色しにくいセラミックブラケットです。審美にこだわる患者様に対応できます。


コーナーとエッジに丸みをつけることで患者様の不快感が減少します。

ベース面の微結晶により、一定した接着強度が得られます。


化学重合及び光重合接着材に対応しています。

#### ブラケットのつけ方

**1** 取り外し可能な長軸カラーインジケータはブラケットの識別と正確なポジショニングに役立ちます。1mm刻みの段によって高さを計測できるため、ブーンゲージや他の装着用インストゥルメントが不要になります。

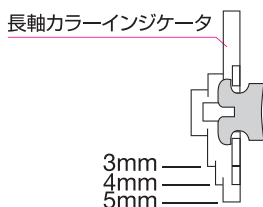


**2** ブラケットに装着された長軸カラーインジケータを利用して歯牙切縁からの距離を測り、歯面の適切な位置にしっかり押し付け装着します。

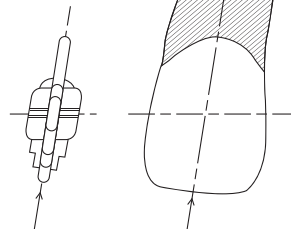

ブラケット正中と長軸カラーインジケータの位置関係


**3** 余剰な接着材を除去し、接着材が硬化した後、長軸カラーインジケータをブラケットから取り除きます。

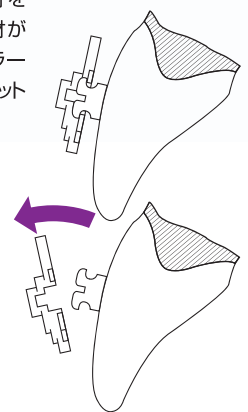


#### ブラケットの外し方

**1** ブラケットをチェックし、ブラケット回りの全ての余剰接着材を取り除いて下さい。


**2** 把持部が上下のタイウイングと平行になるように位置付けします。

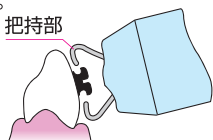

**3** 支持脚部が歯面に接触するまでハンドルを軽く握り、把持部でタイウイングを確実につかみます。動揺歯の場合、切縁や舌側面にフィンガーサポートを与えて下さい。

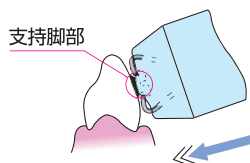

**4** ブラケットが歯面から離れるまでハンドルを握り続けます。

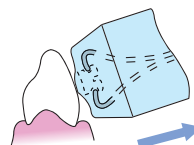

**5** 一方のタイウイングが欠けた場合でも、もう一度やり直すことによって取り外しができます。万一、両側のタイウイングが欠けた場合は、ダイヤモンドバーなどで歯面に残ったブラケットを取り去って下さい。

## Transcend™ Series 6000 Ceramic Brackets トランセンド™ セラミック ブラケット

(N) : 近遠心ナロータイプ

### Roth\*仕様

	Torq.	Ang.	L/R	接着材なし		APC™II 接着材つき		
				.018	.022	.018	.022	
上顎	中切歯	+12°	5°	L	6001-601	6001-701	3300-601	3300-701
				R	6001-602	6001-702	3300-602	3300-702
	側切歯	+8°	9°	L	6001-603	6001-703	3300-603	3300-703
				R	6001-604	6001-704	3300-604	3300-704
	犬歯	0°	11°	L	6001-607	6001-707	3300-607	3300-707
				R	6001-608	6001-708	3300-608	3300-708
	犬歯 フック付	0°	11°	L	6001-605	6001-705	3300-605	3300-705
				R	6001-606	6001-706	3300-606	3300-706
	小臼歯	-7°	0°	L/R	6001-616	6001-716	3300-616	3300-716
				L/R	6001-618	6001-718	3300-618	3300-718 (N)
	小臼歯 フック付	-7°	0°	L/R	6001-615	6001-715	3300-615	3300-715
				L/R	6001-617	6001-717	3300-617	3300-717 (N)
前歯	-1°	0°	L/R	6001-621	6001-721	3300-621	3300-721	
			L	6001-627	6001-727	3300-627	3300-727	
犬歯	-11°	7°	R	6001-628	6001-728	3300-628	3300-728	
			L	6001-625	6001-725	3300-625	3300-725	
犬歯 フック付	-11°	7°	R	6001-626	6001-726	3300-626	3300-726	
			L/R	6001-636	6001-736	3300-636	3300-736	
第1小臼歯	-17°	0°	L/R	6001-638	6001-738	3300-638	3300-738 (N)	
			L/R	6001-635	6001-735	3300-635	3300-735	
第1小臼歯 フック付	-17°	0°	L/R	6001-637	6001-737	3300-637	3300-737 (N)	
			L/R	6001-644	6001-744	3300-644	3300-744	
第2小臼歯	-22°	0°	L/R	6001-646	6001-746	3300-646	3300-746 (N)	
			L/R	6001-643	6001-743	3300-643	3300-743	
第2小臼歯 フック付	-22°	0°	L/R	6001-645	6001-745	3300-645	3300-745 (N)	

1パック5個入り  
希望医院価格(消費税別)  
**9,800円**

接着材つきブラケットは、  
プリスターケース入り。  
1パック4個入り  
希望医院価格(消費税別)  
**8,320円**

便利な1症例キットも  
ご用意しております。

### 1症例キット

キット内容	APC™II 接着材つき	
	.018	.022
上下顎3-3	3300-976	3300-996
上下顎3-3犬歯フック付	3300-977	3300-997
	12個入り 希望医院価格(消費税別) <b>24,960円</b>	

キット内容	接着材なし	
	.018	.022
上下顎5-5	—	6010-702
上下顎5-5犬歯/小臼歯フック付	6010-601	6010-701
	20個入り 希望医院価格(消費税別) <b>39,200円</b>	

### 1症例キット(小臼歯ナロータイプ)

キット内容	接着材なし		APC™II 接着材つき	
	.018	.022	.018	.022
上下顎5-5	—	6010-704	3300-978	3300-998
上下顎5-5犬歯/小臼歯フック付	6010-603	6010-703	3300-979	3300-999
	20個入り 希望医院価格(消費税別) <b>39,200円</b>		20個入り 希望医院価格(消費税別) <b>41,600円</b>	

### スタンダード エッジワイス 仕様

	Torq.	Ang.	L/R	接着材なし		APC™II 接着材つき	
				.018	.022	.018	.022
中切歯・側切歯	0°	0°	L/R	6001-801	6001-901	3300-801	3300-901
犬歯・小臼歯	0°	0°	UNIV	6001-805	6001-905	3300-805	3300-905
下顎前歯	0°	0°	L/R	6001-821	6001-921	3300-821	3300-921

希望医院価格 5個/パック  
(消費税別) **9,800円**

希望医院価格 4個/箱  
(消費税別) **8,320円**


### 1症例キット

キット内容	接着材なし		APC™II 接着材つき	
	.018	.022	.018	.022
上下顎5-5	6010-801	6010-901	3300-969	3300-989
	20個/キット 希望医院価格(消費税別) <b>39,200円</b>		20個/キット 希望医院価格(消費税別) <b>41,600円</b>	

便利な1症例キットも  
ご用意しております。

## 3M Unitek

トランセンド™ デイボンディング インストゥルメント  
トランセンド™ セラミック ブラケット専用のデイボンディング  
インストゥルメントです。

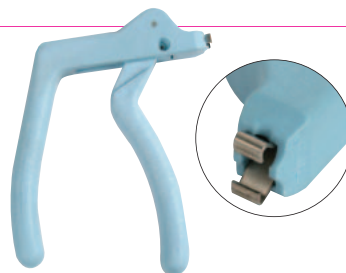

製品番号 444-770  
希望医院価格(消費税別) **22,000円**  
届出番号:14B1X00010000178  
販売名:トランセンド™ デイボンディング インストゥルメント

- 掲載の希望医院価格と参考データは、2009年6月現在のものです(価格に消費税は含まれていません)。
- 製品内容、価格等は予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
- <3M><Unitek><Transcend><トランセンド><APC>は3Mまたはその関連会社の商標です。
- \*Roth仕様は3M Unitek社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

TEL 0120-296-303 URL: <http://www.mmm.co.jp/unitek>  
FAX 0120-406-084

スリーエムヘルスケア株式会社  
ユニテック製品部  
本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。 **3M**